



## INSTRUÇÃO DE USO

### *Minifixadores Externos ZIMED*

	<p><b>FABRICADO POR:</b></p> <p>ZIMED Medical San. ve Tic. Ltd. Şti <b>Adress:</b> Sanayi Mah. 60115 Nolu Cadde. No: 4/101 Sehitkamil 27110 Gaziantep - Turkey</p>
	<p><b>DETENTOR DE NOTIFICAÇÃO:</b></p> <p><b>IMPORTEK - TARGMED Comércio e Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.</b> <b>Endereço:</b> Rua Niterói, 362, salas 16 e 17, Centro, CEP: 09510-200. São Caetano do Sul/SP – Brasil <b>Tel./Fax:</b> (0xx 11) 2629-4344 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:regulatorio@importek.com.br">regulatorio@importek.com.br</a>    <b>Site:</b> <a href="http://www.importek.com.br">www.importek.com.br</a></p>

**Nome Comercial:** Minifixadores Externos ZIMED

**Nome Técnico:** SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS EXTERNOS (9000061)

**Registro ANVISA:** 80519830011

**Rev.** 03/2023

**PROUTO ESTÉRIL.**

**PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**

**Minifixadores Externos ZIMED**

**ATENÇÃO:** *Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação destes pontos poderá culminar em complicações.*










*A disponibilização desta Instrução de Uso em formato não impresso - meio digital ([www.importek.com.br](http://www.importek.com.br)), está em conformidade com a RDC n° 751/2022. E requer a utilização de um leitor de PDF, para obter o programa faça o download gratuito em: <https://www.adobe.com/br/acrobat/pdf-reader.html> .*

*Verifique no rótulo do produto se a revisão da instrução de uso obtida é correspondente. Não utilize instrução de uso com revisão/ano diferente àquela indicada no rótulo do produto adquirido.*

*Para obter a instrução de uso em formato impresso, entre em contato com a IMPORTEK através do telefone (SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor) 11 2629-4344, em nosso site [www.importek.com.br](http://www.importek.com.br) ou e-mail [regulatorio@importek.com.br](mailto:regulatorio@importek.com.br). Não há custo adicional para o envio da instrução de uso do produto no formato impresso ou digital.*

*Esta instrução de uso é compatível com todos os modelos da FAMÍLIA de implantes ortopédicos - **Minifixadores Externos ZIMED**, expostos na tabela abaixo.*

**Minifixadores Externos ZIMED**
**Modelos Comerciais: Descrição, Referências e Informações Gráficas**

Referências	Descrição	Dimensões (mm)	Informação Gráfica
5084-0000	Fixador de Falange	83,86 x 25	
5084-0001	Fixador para Alongamento de Falange	72 x 18,9	
5084-0002	Fixador Dinâmico de Falange	88 x 19,6	
5084-0010	Fixador de Falange Pequeno	42 x 18,9	
5084-0020	Fixador de Falange Médio	52 x 18,9	
5084-0030	Fixador de Falange Longo	72 x 18,9	
5084-0040	Fixador de Falange Extralongo	82 x 18,9	
5084-0050	Fixador de Falange Extralongo I	92 x 18,9	
5084-0060	Fixador de Falange Extralongo II	102 x 18,9	

**Conteúdo:** Os *minifixadores externos* são fornecidos na forma ESTÉRIL, acondicionados individualmente em embalagem primária tipo envelope de duplo blister, identificada com etiqueta adesiva e, posteriormente, em caixa de papel cartão de alta gramatura como embalagem secundária, igualmente identificada com rótulo informativo para identificação e rastreabilidade em conformidade com a RDC/ANVISA 751/2022. Na

**Minifixadores Externos ZIMED**

embalagem secundária são também fornecidas 3 etiquetas para rastreabilidade e 01 catálogo de instrução de uso disponibilizado no formato digital, conforme RDC 751/2022 ([www.importek.com.br](http://www.importek.com.br) ou [regulatorio@importek.com.br](mailto:regulatorio@importek.com.br)).

**Obs.:** Verifique no rótulo do produto se a revisão da instrução de uso obtida é correspondente. Não utilize instrução de uso com revisão/ano diferente àquela indicada no rótulo do produto adquirido. Para obter a instrução de uso em formato impresso, entre em contato com a IMPORTEK através do telefone (SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor) 11 2629-4344, em nosso site [www.importek.com.br](http://www.importek.com.br) ou [regulatorio@importek.com.br](mailto:regulatorio@importek.com.br). Não há custo adicional para o envio da instrução de uso do produto no formato impresso ou digital.

**Composição:**

Todas as matérias-primas empregadas na fabricação dos produtos estão em conformidade com normas técnicas internacionais a fim de garantir a segurança e qualidade dos produtos. Sendo fabricadas a partir de liga de alumínio.

**PROUTO ESTÉRIL.****PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO****Princípio de Funcionamento**

O Minifixador Externo ZIMED é um produto médico não implantável, empregado na consolidação óssea por meio da fixação esquelética externa. Isto porque, é posicionado externamente ao corpo humano e fixado ao tecido ósseo por meio de elementos de ancoragem (vendidos separadamente e Registro ANVISA específico - não fazem parte deste produto).

O fixador é formado por módulos encaixados que devem ser ajustados quanto ao comprimento e angulação em conformidade com o sítio anatômico a ser empregado, tais como falanges, ossos do pé e da mão; a decisão técnica do médico responsável e

---

**Minifixadores Externos ZIMED**

a finalidade pretendida. Em vista disso, estão disponíveis em diferentes tamanhos a fim de atender a maioria das necessidades em procedimentos de fixação, consolidação e cicatrização óssea.

Como objetivo, o dispositivo visa transferir a carga aplicada no osso fraturado para o aparelho (fixador externo) de forma a manter o osso ausente de carga e estável durante o procedimento de cicatrização óssea, regeneração da fratura e osteossíntese em alongamento ósseo.

Destaca-se que esse dispositivo médico é de uso único, fornecido estéril (Radiação Gama), indicado para estabilização óssea temporária e instalado externamente ao corpo.

**Indicação ou Finalidade de Uso**

O fixador externo tem como finalidade a manutenção do alinhamento ósseo em procedimentos de redução, alongamento ou estabilização de deformidades ósseas para processos de osteossíntese em geral como fraturas, pseudoartroses, osteotomias, artrodese, alongamento e redução. Desta forma, são indicados em cirurgias ortopédicas e traumatológicas em que a fixação esquelética externa é apropriada para o tratamento corretivo/preventivo do tecido ósseo afetado.

O Minifixador Externo ZIMED é aplicado a procedimentos de estabilização de ossos curtos, tais como: falanges, ossos das mãos e ossos dos pés.

**Instrução de uso**

Os dispositivos para saúde, Minifixadores Externos, devem ser empregados em procedimentos médicos apenas por profissionais habilitados e capacitados em procedimentos específicos para a instalação do produto em questão. Ademais, é fundamental a elaboração de um planejamento criterioso das etapas que envolvem o pré-operatório, o transcirúrgico e o pós-operatório.

---

*Minifixadores Externos ZIMED**1. Pré-operatório:*

Na etapa pré-operatória, o médico deverá realizar anamnese minuciosa e exames pré-operatórios aplicáveis, determinação de método cirúrgico e técnica de intervenção, seleção do dispositivo e do instrumental apropriado para auxiliar no procedimento. Para tanto, uma chave Allen específica é empregada a fim de que se promova o adequado aperto dos parafusos do dispositivo. Os instrumentos específicos empregados no procedimento cirúrgico e compatível com os dispositivos médicos em questão deverão ser adquiridos separadamente, não acompanham o produto e são objeto de registro ANVISA específico.

*2. Transcirúrgico:*

As técnicas para intervenção clínica variam de acordo com o procedimento selecionado pelo médico responsável. Sendo assim, o método previsto neste formulário é apenas descritivo e, portanto, somente uma referência. Por isso, cabe ao profissional habilitado a avaliação dos métodos associado a situação clínica do paciente para uma intervenção clínica segura e com vista a atingir os resultados esperados.

Convém destacar que a seleção da metodologia inclui a escolha do dispositivo médico e componentes ancilares (não acompanham o produto e possuem registros ANVISA específicos) - quando aplicável, com as características apropriadas para cada montagem e compatíveis entre si e com o minifixador externo a ser empregado. Também é de responsabilidade do cirurgião, após análise do caso clínico do paciente, o conhecimento e familiaridade com a técnica cirúrgica a ser empregada, os produtos para saúde empregados e os procedimentos que envolvem seu uso.

Os componentes do Minifixador Externo ZIMED proporcionam mecanismos que permitem regulá-lo quanto ao comprimento e angulação (conector), e, deste modo, adaptá-lo de acordo com a necessidade de cada caso clínico. A regulação do dispositivo é de responsabilidade do médico-cirurgião.

---

**Minifixadores Externos ZIMED****2.1. Técnica:**

- Seleção adequada do dispositivo (Minifixador Externo) e componentes anciliares.
- Incisão cirúrgica e inserção do pino ou fio ósseo (componentes anciliares e não integrantes deste produto, registros ANVISA específicos). Ratificar o posicionamento por Raios-X;
- Instalar e montar o fixador conforme deformidade óssea, osteossíntese, estrutura anatômica e técnica de intervenção selecionada (determinado em planejamento e metodologia médica);
- Ajustar os componentes adequadamente e fixá-los;
- Suturar e limpar o acesso cirúrgico.

**OBS:** as etapas anteriores a instalação do fixador externo correspondem a fase de implantação de dispositivos de ancoragem e, portanto, com técnicas cirúrgicas específicas. Logo, como estes produtos não fazem parte do fixador externo para venda ou registro, e, deste modo, as etapas que o envolvem foram mencionadas pontualmente nesta ocasião.

**3. Pós-operatório****3.1. Imediato:**

- Orientar o paciente quanto a instruções de manutenção do dispositivo e cuidado com o local de instalação do dispositivo médico;
- Instruir o paciente a observar e higienizar meticulosamente a região operada. O paciente deverá alertar o médico sobre qualquer moléstia ou imprevisto.

**3.2. Permanência Temporária:**

- O tempo de permanência do fixador deve ser determinado pelo profissional responsável.

**3.3. Remoção do Sistema Externo de Fixação**

- Visto que o dispositivo externo de fixação foi projetado para estabilizar o local da descontinuação óssea durante o processo de consolidação e/ou

**Minifixadores Externos ZIMED**

alongamento/redução do tecido ósseo, após a cicatrização o dispositivo deve ser, impreterivelmente, removido.

- A remoção também poderá ser recomendável em casos de sinais ou evidência de corrosão, reação ou dor localizadas; quebra, flexão, ruptura ou afrouxamento do dispositivo ou perda óssea.
- O dispositivo removido do paciente e que não for submetido a estudos e/ou análises, deve ser imediatamente descartado de acordo com legislação sanitária vigente e sob responsabilidade da instituição hospitalar. Para tanto, convém ressaltar que o descarte do produto médico deve ser realizado na forma descaracterizada, ou seja, que impossibilite qualquer reutilização (quebrar e amassar o dispositivo) e identificado: "Impróprio para o uso". A descaracterização poderá ser realizada por prensas ou instrumento de amassamento.

**Condições especiais de transporte, armazenamento, conservação e/ou manipulação**

- Armazenar e transportar em local seco, limpo e sem resíduos ou poeira.
- Não armazenar próximo a janelas ou paredes (evitar condensação).
- Armazenar e transportar de forma a evitar quebra, prensa, etc.
- Armários fechados são recomendados para armazenamento de material estéril, a fim de evitar acúmulo de poeira e contato excessivo com o material.
- Atentar-se às condições de ventilação, limpeza e entrada e saída de funcionários.
- Emprego de pessoal treinado na área de material estéril e no transporte.
- Não armazenar e evitar ser transportado sob luz solar direta.
- A temperatura ambiente deve ser 18°C a 28°C, a umidade entre 35% a 70%.
- Dispor em prateleiras a, no mínimo, 20-25 cm do chão e 45-50 cm do teto.
- Manter na embalagem original até o momento da utilização;
- Não danificar ou abrir a embalagem antes de sua utilização;



**Minifixadores Externos ZIMED**

- Evitar exposição à luminosidade intensa;
- Não utilizar se o prazo de validade estiver expirado;
- Manipular o dispositivo em condições assépticas e de acordo com as normas de biossegurança vigentes
- Após aberto, manipular com luvas e instrumentos estéreis;
- Não reesterilizar.
- Somente profissionais habilitados e com conhecimentos em técnicas cirúrgicas e em procedimentos necessários para utilização adequada do produto deverão fazer uso dos fixadores externos.
- Utilizar instrumental apropriado para a manipulação do dispositivo;
- Manipular cuidadosamente, evitar movimentos bruscos e quedas;
- Não usar se a embalagem estéril estiver violada, com danos ou de alguma forma alterada.

**Esterilização**

- PRODUTO ESTÉRIL - Esterilização por radiação Gama
- PRODUTO PASSÍVEL DE PREPROCESSAMENTO
- VALIDADE: 5 anos a partir da data de esterilização

**Descarte do produto**

Devem ser descartados conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do hospital, em concordância com orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e previsto na RDC 222/2018.

**Precauções e Advertências***Precauções*

ESTÉRIL.

---

**Minifixadores Externos ZIMED**

USO PROFISSIONAL – Somente profissionais habilitados e com conhecimentos em técnicas cirúrgicas e em procedimentos clínicos que necessitem da instalação do produto deverão fazer uso do Minifixador Externo.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

Ao utilizar os dispositivos para fixação externa, o cirurgião deve considerar os seguintes fatores:

- RECOMENDA-SE USO ÚNICO: Embora possa parecer que não foi danificado, a tensão prévia pode ter originado imperfeições que reduzem a vida útil do dispositivo e a qualidade do produto, o que influencia negativamente no mecanismo de ação.
- Profissão ou atividades do paciente: O risco de fratura ou flexão do dispositivo existe e pode ser aumentada se o paciente exercer atividades excessiva no membro ou região de reparo ósseo em casos que as atividades exercem forças sobre o dispositivo e possam culminar em falhas.
- Condição psicológica do paciente: o risco de fratura do dispositivo é maior em pacientes senis, com deficiência mental, alcoólatras, usuários de drogas ou pacientes propensos a ignorar as limitações e precauções necessárias durante o uso do dispositivo.
- Pacientes com limitação: Pessoas que apresentam limitação ou dificuldade de uso adequado de dispositivos para suporte podem correr riscos durante a reabilitação pós-operatória.
- Os fixadores podem se soltar ou quebrar caso sejam sujeitos a aumento de carga, fatores como nível de sensibilidade e adesão às instruções de suporte de peso e de carga o que pode afetar o desempenho do produto.
- Antes de proceder à intervenção clínica, o cirurgião deve considerar o estado clínico geral do paciente.

**Minifixadores Externos ZIMED**

- É essencial cumprir as condições de assepsia quando a embalagem protetiva e, principalmente a embalagem estéril forem abertas a fim de manter a esterilidade do produto.
- O paciente deve ser alertado sobre os riscos de deambular sem o auxílio de dispositivo de suporte, como muleta ou bengala, até a completa recuperação e/ou adaptação ao produto médico (fixadores externos empregados em ossos do pé).
- Peso do paciente: Um paciente acima do peso ou obeso produzirá cargas sobre o dispositivo que poderão culminar em fraturas ou flexões.
- Para minifixadores externos empregados em ossos curtos do pé, o peso do paciente é um fator de preocupação. Visto que nenhum dispositivo com a finalidade de suportar ou não algum peso poderá resistir às insuportáveis pressões geradas pelo peso total do corpo do paciente. Por isso, até que seja alcançada a recuperação da cirurgia, o paciente deve utilizar algum suporte externo adequado e restringir as atividades físicas que possam colocar pressão adicional ou permitir qualquer movimento na área de fixação, que possa causar o retardamento do processo de consolidação

**Advertências**

USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL.

ESTÉRIL - Radiação GAMA.

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

- O uso dos dispositivos em condições não adequadas poderá prejudicar o paciente e conduzir a resultados não satisfatórios.
- Em caso de queda do dispositivo ou presença de arranhões, fissuras ou amassos de grande intensidade que possam prejudicar o bom funcionamento, o fixador deverá ser descartado e um novo deverá ser adquirido.

---

**Minifixadores Externos ZIMED**

- Manipular cuidadosamente, evitar quedas e movimentos bruscos.
- O produto NÃO deverá ser reutilizado - USO ÚNICO
- Não Reesterilizar
- Não Reprocessar
- Deve-se manipular e aplicar sempre com instrumentos em bom estado de conservação e adequados a fim de eliminar fontes de danos causados aos componentes por instrumentação inadequada.
- A análise crítica da condição do dispositivo está sob responsabilidade do profissional especializado.
- Os dispositivos devem ser aplicados exclusivamente para o fim a que se destina em conformidade.
- Devem ser utilizados em conformidade com as recomendações contidas nas instruções de uso, bem como, com técnicas cirúrgicas apropriadas.
- Os dispositivos não devem ser alterados ou modificados.
- Recomenda-se a utilização e/ou associação a produtos e instrumentais do fabricante: ZIMED.

**INFORMAÇÃO AO PACIENTE**

- O paciente deve ser orientado adequadamente quanto aos cuidados no pós-operatório. A capacidade e a vontade do paciente em seguir as instruções e recomendações constituem um dos aspectos mais importantes para o sucesso de procedimentos ortopédicos.
- Crianças, pacientes idosos, pacientes com problemas mentais ou dependentes químicos podem representar um risco maior para o sucesso, visto que estes pacientes podem ignorar as instruções e restrições.

---

**Minifixadores Externos ZIMED**

- Deve-se instruir o paciente, a critério do profissional responsável, sobre a utilização de suportes externos, auxílio para deambular e aparelhos ortopédicos projetados para imobilizar a área da fratura e limitar a carga.

**Contraindicações**

- Infecção local ou sistêmica.
- Qualidade ou quantidade óssea insuficiente, canal intramedular obliterado ou condições que tendem a retardar a recuperação, em que se inclui limitações do fluxo sanguíneo - Contraindica a implantação de dispositivos implantáveis (vendidos e registrados separadamente - não acompanham este produto), porém essenciais para a instalação do fixador externo.
- Sensibilidade a matéria-prima.
- Obesidade Mórbida
- Problemas, dificuldades ou incapacidade que o paciente apresente em seguir as instruções e recomendações pós-operatórias.
- Inflamação local.

**Efeitos Adversos**

- O uso incorreto do dispositivo pode causar fratura.
- O uso de dispositivo defeituoso afetará o desempenho esperado do produto.
- Esterilização inadequada gera o risco de infecção e contaminação.
- Os dispositivos não são materiais implantáveis, em vista disto devem ser instalados exteriormente ao organismo e removidos do paciente, após a finalização do tratamento em questão.
- Afrouxamento.
- Flexão, rachadura ou quebra do(s) dispositivo(s) de fixação.

---

**Minifixadores Externos ZIMED**

- Perda de fixação ou migração que pode resultar em danos aos tecidos moles, perfuração da pele ou hemorragias.
- Perda de posição anatômica por falta ou má de consolidação óssea - rotação e/ou angulação.

***Procedimento na observação de Eventos Adversos:***

- Informar ao Gerente de Risco do Hospital sobre os eventos observados;
- Informar os dados de Identificação do produto transcritos no prontuário do paciente e contidos na etiqueta de rastreabilidade;
- Solicitar ao Gerente de Risco que faça a devida notificação do evento adverso na ANVISA (órgão sanitário competente), através do endereço eletrônico <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/produtos>.